

# EASYSEPT®

Norme NF T 72-281

Traitement des volumes et des surfaces  
par micro diffusion sèche



Easysept est un diffuseur professionnel, portable, robuste, léger, maniable. Il permet une diffusion orientable et se transporte aisément.

Equipé d'un flexible détachable et d'une tête orientable, il est utilisable en toute circonstance. Il est muni d'un système de purge automatique évacuant tous les résidus de produit après chaque utilisation.



Micro-diffusion sèche



HYGIASEPT®



L'Hygiène Active !

**Mode d'emploi :**

Branchez le cordon sur le secteur.  
Le dernier volume traité et le produit utilisé s'affichent.  
Pour changer le volume, déplacer le curseur clignotant avec la touche (-). Modifier la valeur avec la touche (+). Vous pouvez remettre à zéro le volume affiché en maintenant la touche (-) enfoncée et en appuyant sur la touche (+) et relâcher.  
Pour changer de traitement, appuyer sur la touche (Mem) et utiliser la touche (+) pour sélectionner le nouveau produit : confirmer en appuyant sur la touche (Mem). Appuyer sur (S) pour démarrer.

Arrêt pendant le cycle :  
Appuyer sur (S) pendant 1 seconde et appuyer une deuxième fois 1 seconde.

**Tableau des traitements :**

- 1 - Hygiaseptyl Spray
- 2 - Hygiaseptyl Spray Plus
- 3 - Hygiaseptyl Spray alimentaire
- 4 - Hygiaseptyl DMO
- 5 - Hygiaseptyl Base aqueuse



(Voir notice d'utilisation du programmateur au verso)

## CARACTERISTIQUES

Puissance :	120 W
Pression de sortie (air) :	3,5 bar
Longueur de flexible :	1,20 m
Type de carrosserie :	Portative
Matière carrosserie :	Aluminium peint
Longueur hors tout :	35 cm
Largeur hors tout :	23 cm
Hauteur hors tout :	36 cm
Poids à vide :	7,7 kg
Tension :	230 Vac
Réservoir :	Jerrican 2L
Buse :	Delrin



## NOTICE D'UTILISATION PROG 1 – AFFICHAGE LCD

### PREMIERE UTILISATION EN FONCTION DU PAYS (m<sup>3</sup> ou ft<sup>3</sup>)

Lors de la première utilisation, il convient de choisir l'unité de mesure, à savoir les m<sup>3</sup> ou ft<sup>3</sup>.

Pour cela, avant de brancher le diffuseur sur le secteur, appuyer sur la touche (Mem) et la maintenir appuyée.

Brancher le diffuseur, l'écran affiche "HYGIASEPT". Attendre que l'écran affiche "OK" avant de relâcher la touche.

Appuyer sur la touche (+) pour sélectionner l'unité de mesure (m<sup>3</sup> ou ft<sup>3</sup>).

Valider votre choix en appuyant sur la touche (Mem).

### UTILISATION APRES PREMIERE INITIALISATION

#### Choix du volume :

La touche (-) sert au déplacement du curseur de droite à gauche pour définir le caractère (chiffre) à choisir. L'affichage est limité à 2500 m<sup>3</sup>. La touche (+) choisit le caractère. Une fois la sélection faite, valider votre choix en appuyant sur la touche (Mem). Le curseur se déplace pour le choix du produit.

#### Choix du produit :

Utiliser la touche (+) pour sélectionner le produit et valider votre choix par la touche (Mem). Appuyer ensuite sur la touche (S) pour démarrer le programme. Le temps en minutes s'affiche sur l'écran avec le produit choisi.

A la fin du cycle, un système de purge se met en fonctionnement et l'écran affiche le message suivant : "Attendez "x" minutes – purge du circuit". *Le nombre de minutes (de 2 à 3) dépend du type de diffuseur.*

#### **Remarque**

Lors du branchement sur le secteur, l'écran affiche le dernier traitement effectué (volume et produit). Si vous souhaitez réaliser le même traitement, le démarrage peut être instantané en appuyant sur la touche (S).

Si le volume affiché (celui du dernier traitement) est trop éloigné du nouveau volume souhaité, il faut remettre le volume à zéro.

#### Remise à zéro :

Pour remettre l'affichage à zéro, appuyer sur la touche (-), la maintenir enfoncée et appuyer brièvement sur la touche +. Relâcher les touches.

Si le volume affiché (celui du dernier traitement) est proche du nouveau volume souhaité, se déplacer avec la touche (-) pour sélectionner le chiffre à modifier, appuyer sur la touche (+) pour incrémenter le chiffre et valider votre choix en appuyant sur la touche (Mem).

*L'Hygiène Active !*

**EXEMPLE**  
**TABLEAU ESTIMATIF DE FONCTIONNEMENT ET DE CONSOMMATION**  
**Diffuseurs ECOSEPT® et EASYSEPT®**

**Hygiaseptyl® Spray - Consommation estimative : 2 ml / m<sup>3</sup>**

<b>Traitement curatif de l'air et des surfaces Et des systèmes de ventilation après nettoyage</b>	
<b>Volume à traiter en m<sup>3</sup></b>	<b>Affichage programmeur en minutes</b>
2	1
4	2
6	3
8	4
10	5
12	6
14	7

<b>Traitement préventif de l'air et des surfaces Et des systèmes de ventilation par bio décontamination</b>	
<b>Volume à traiter en m<sup>3</sup></b>	<b>Affichage programmeur en minutes</b>
4	1
8	2
12	3
16	4
20	5
24	6
28	7

Temps de contact conseillé : 30 minutes

Réutilisation rapide après aération  
Par le système de ventilation